

簡易操作手順書

機種名:アスペンエクスキャリバー



④対極板の種類を選択。
(RETURN TYPE SELECTボタン)
デュアルタイプの場合
ALARM SET POINTボタンを押す

②電源スイッチをONに
してください。

①アクティブ附属品を
本体に接続

③対極板コネクタを
対極板接続端子に接続してください。
その際、対極板選択ハンドルを回転させて
対極板を接続してください。

注)アクティブ附属品を使用しない時は
常に安全で絶縁された場所に置き、患者の上に置かないでください。