



【CS-05】

** 2018年1月(第3版)

* 2017年4月(第2版)(新記載要領に基づく改訂)

医療機器承認番号:22100BZX00075000

機械器具 30 結紮器及び縫合器
管理医療機器 取外し可能な皮膚ステープル (JMDNコード: 35884002)
(単回使用ステープルリムーバ JMDNコード: 16787002)
リフレックス スキンステープラー
(エクストラクター)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

1. 再使用禁止。
- * 2. 再滅菌禁止。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

日本メディカルネクスト株式会社

電話番号: 06-6222-6606

製造元


コンメド社(アメリカ合衆国)

CONMED Corporation

【形状・構造及び原理等】

〈形状〉

本品は滅菌済み製品である。

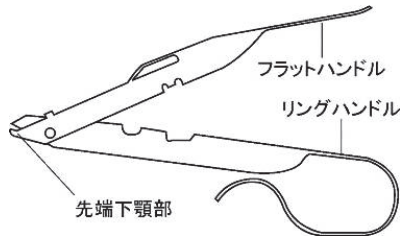

〈組成〉

ステンレス鋼(ニッケル、クロムを含む)

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

取外し可能な皮膚ステープルの定義を逸脱しない使用目的、効能又は効果
単回使用ステープルリムーバの定義を逸脱しない使用目的、効能又は効果

【使用方法等】

〈使用方法〉

1. 本品の先端下顎部を針の下へ差し込む。
2. リングハンドルで位置を決め安定させ、針が完全に開ききるまで、フラットハンドルを押さえ込む。
3. ハンドルを押さえ込んだまま針を皮膚面より持ち上げ、針を取り外す。なお、皮膚から取り外した針は下図のような形状となる。
- * 4. 本品を逆さまにして開き、針を取り外す。



抜針形状

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管上の注意

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて室温で保管すること。

〈有効期間〉

5年間[自己認証(当社データ)による]

* 本品のラベルの使用期限を参照すること。