



【CS-25】

\*\* 2018年1月（第3版）

\* 2017年8月（第2版）（新記載要領に基づく改訂）

医療機器承認番号：21400BZY00252000

機械器具 25 医療用鏡

管理医療機器 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具（JMDNコード：70164020）

## コンメド ラパロスコピック 電極 （付属品）

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 再使用禁止。
- \* 2. 再滅菌禁止。

#### 【形状・構造及び原理等】

＜形状＞

本品は滅菌済み製品である。



#### 【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

本品は、電気手術器に接続して用いるモノポーラアクティブ電極であり、腹腔鏡による外科手術に用いる。

#### 【使用方法等】

＜使用方法＞

1. コンメドラパロスコピック電極と電気メス本体への接続方法

(1) 4mm プラグ接続コード

4mm プラグ付電極と接続し、他方を別売のアダプターを用いて8mm ピンプラグ対応の電気メスに接続する。

(2) 2.4mm プラグ接続コード

2.4mm プラグ付電極と接続し、他方を別売のアダプターを用いて8mm ピンプラグ対応の電気メスに接続する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- \* 1. ケーブルはループにせず、他のコード等の導体に接触しないようにすること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管上の注意

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて室温で保管すること。

＜有効期間＞

5年間[自己認証(当社データ)による]

- \* 本品のラベルの使用期限を参照すること。

#### \*\* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

日本メディカルネクスト株式会社

電話番号：06-6222-6606

製造元

コンメド社(アメリカ合衆国)

CONMED Corporation