



【CS-26】

\*\* 2018年1月(第3版)

\* 2017年4月(第2版)(新記載要領に基づく改訂)

医療機器届出番号: 27B1X00116000259

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管  
一般医療機器 気腹用チューブ (JMDNコード: 70353000)

## コンメド 気腹チューブ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 再使用禁止。
- \* 2. 再滅菌禁止。

#### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

日本メディカルネクスト株式会社

電話番号: 06-6222-6606

製造元

コンメド社(アメリカ合衆国)


CONMED Corporation

#### 【形状・構造及び原理等】

＜形状＞

本品は滅菌済み製品である。

本品は腹腔鏡下手術時に用いるフィルター付き気腹用チューブである。患者側に接続するコネクタはすべてルアー型である。

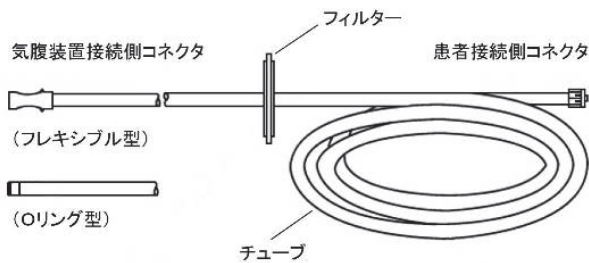

＜組成＞

気腹装置接続側コネクタ(フレキシブル型)、チューブ

: ポリ塩化ビニル(フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)を含む)

＜作動・動作原理＞

本品は気腹操作において、気腹装置と気腹針又はトロカールを接続する柔軟性のあるチューブである。

#### 【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

本品は、腹腔鏡下手術時の気腹に用いる。

#### 【使用方法等】

＜使用方法＞

1. 気腹装置接続側コネクタを気腹装置に接続し、チューブ内をCO<sub>2</sub>ガスで清浄する。
2. 患者接続側コネクタを患者側(気腹針またはトロカールのポート)に接続する。
3. 気腹装置を操作し、気腹を行う。

#### 【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意  
(1) 気腹中は気腹針またはトロカールが腹壁から抜けていないことを常に確認し、同時に腹腔内圧をモニターすること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管上の注意  
水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて室温で保存すること。

\* ＜有効期間＞

5年間[自己認証(当社データ)による]

本品のラベルの使用期限を参照すること。