



【GM-31】

** 2016年 10月 (第5版) (新記載要領に基づく改訂)
* 2014年 3月 (第4版)

医療機器届出番号: 27B1X00116000146

機械器具 6 呼吸補助器
一般医療機器 単回使用汎用ウォータートラップ (JMDN コード : 41679000)

ウォータートラップ

再使用禁止

【警告】

** <使用方法>

使用前に本品の接続に誤りがないか、使用前及び使用中に各接続部が気密かつ確実であり、漏れや閉塞がないことを確認すること。[適切な酸素投与を行えないおそれがある。]

【禁忌・禁止】

** <併用医療機器 (相互作用の項参照) >

本品は人工呼吸器回路には使用しないこと。[PEEP などの機能が働かず、換気不全となるおそれがある。]


<使用方法>

再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

<形状>

本品は未滅菌品である。

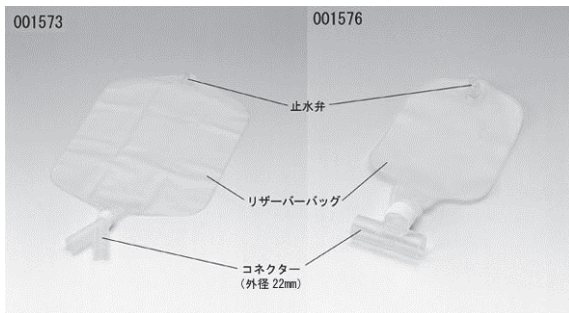

カタログ番号	品目名
001573	トラキユニット
001576	トラキT型アダプターバッグ付き

<作動・動作原理>

呼吸回路中に設置することにより、回路内に結露する水を回収することで、患者側への流出を防ぐと共に、水の排出作業を容易にする。

【使用目的又は効果】

<使用目的>

加温加湿時に蓄積する復水を回収するため、呼吸回路に用いる。

【使用方法等】

<使用方法>

- ** 1. 呼吸回路内に貯留した水が確実に本品に流入するよう、本品を呼吸回路の最も低い位置に接続する。
- ** 2. 本品下部の止水弁が閉まっていることを確認する。
- 3. 使用中、リザーバーバッグの貯水状態を適宜確認し、必要に応じて排水する。
- 4. 排水は、本品の下にバケツ等の排水受けを置き、排水の勢いに注意しながらリザーバーバッグ下部に設置されている止水弁を開く。

- 5. 排水後は回路が気密状態になるようリザーバーバッグの止水弁の密栓を行い、気密状態にあることを確認する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

本品に貯留した水は適宜排水すること。[貯留した水が回路内に逆流したり、貯留水の重さにより本品が脱落するおそれがある。]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ** (1) 本品の滅菌は行わないこと。[製品に変形及び破損の発生、有毒ガスが残留するおそれがある。]
- ** (2) フェノールやエーテルなどの有機溶媒やホルマリン系消毒剤は使用しないこと。[製品の変形及び破損のおそれがある。]

** 2. 相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)

(1) 併用禁忌(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
人工呼吸器回路	使用禁止	PEEP などの機能が働かず、換気不全となるおそれがある。

【保管方法及び有効期間等】

** 1. 保管上の注意

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて室温で保管すること。

* <有効期間>

本品のラベルの使用期限を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

日本メディカルネクスト株式会社

** 電話番号 : 06-6222-6606

* 製造元

ゲイルメッド社(台湾)

GaleMed Corporation