



【IS-24】

2016年4月(第1版)

医療機器届出番号: 27B1X00116000255

機械器具 21 内臓機能検査用器具  
一般医療機器 呼吸センサ (JMDNコード 70072000)

## E・フローセンサ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

1. 複数患者への使用禁止[交差感染のおそれがある。]

#### 【形状・構造及び原理等】

〈形状〉

作動温度: +15~+40℃



〈作動・動作原理〉

吸気が通過する際に、吸気通路に配置されるホットワイヤーの熱を奪う。その際、熱線抵抗が変化することを利用して、電流値の変化を空気流量の検出に用いる。

#### 【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

鼻や口、回路内のフローや圧力などを検出するために用いるセンサ。

#### 【使用方法等】

〈使用方法〉

1. 接続する機器の添付文書(取扱説明書)を参照。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

1. 本品の消毒は、接続した機器から外して実施すること。
2. 70%エタノール溶液を用いて消毒を実施すること。

#### 【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品を可燃性物質と共に使用しないこと。
- (2) 本品の使用前及び使用中は、フローセンサが汚染されないように注意すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管上の注意

- (1) 保管温度: -20~+40℃
- (2) 水に濡れないように保管すること。
- (3) 直射日光の当たる場所、高温・多湿な場所、過度なほこりが発生する場所、空気中に塩分やイオウ分を含む場所での保管は避けること。
- (4) 重ねて保管する場合には重みで本品が破損しないように配慮すること。

〈有効期間〉

個別包装に記載。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

日本メディカルネクスト株式会社

電話番号: 06-6222-6606

製造元

インターサージカル社(英国)

Intersurgical Limited