



【IS-47】

* 2017年8月(第2版)(新記載要領に基づく改訂)
2016年4月(第1版)

医療機器認証番号:223AFBZX00106000

機械器具6 呼吸補助器

管理医療機器 呼吸回路セット (JMDN コード 70566000)

インターサージカル呼吸回路シリーズ (加温加湿器用チャンバー 2310000/2310170/2340170)

再使用禁止

*【警告】

＜使用方法＞

1. 使用前に接続に誤りがないか、使用前および使用中に各接続部が気密かつ確実に漏れや閉塞がないか、また、酸素の吹き出しを確認すること。[適切な呼吸管理が行えないおそれがある。]
2. 使用中は患者の状態を定期的に観察すること。[患者の異常を発見できないおそれがある。]

*【禁忌・禁止】

＜併用医療機器＞

人工鼻と併用しないこと。[「相互作用」の項参照]

＜使用方法＞

1. 再使用禁止
2. チャンバーに給水する際には、ガスポートを使用しないこと。(2340170のみ) [誤接続による換気不全、ガスポートを介した菌による人工呼吸回路内汚染の可能性がある]


【形状・構造及び原理等】

＜形状＞

1. 2310000、2310170 (デュアルフロート)
自動注水チャンバー



2. 2340170 在宅用中容量手動注水チャンバー

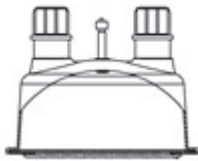

個別規格：

	2310000、2310170	2340170
最大流量 (L/分)	180	140
圧縮容量 (mL)	395	150~390
最高圧 (cmH ₂ O)	-	180

＜作動・動作原理＞

装着した加温加湿器により加温されたチャンバー内の水が気化することにより、チャンバー内を通過するガスの湿度を上げる。

自動注水チャンバー：

精製水が減少することでフロートが下がり、一方向弁が開放されることで給水が行われる。精製水が水位レベル上限に達するとフロートが押しあがり、一方向弁が閉じることで給水が停止する。デュアルフロートはフロート2個(2310000、2310170)を有する。

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

人工呼吸器等に接続し、呼吸管理に用いること。

【使用方法等】

＜使用方法＞

* 1. 使用

- (1) コネクタについているセーフティキャップを外す。
- (2) チャンバーチューブについているキャップを外し、補充用水バッグに刺し、青色のエア抜きキャップを開放する。(2310000、2310170)
- (3) チャンバーに給水する。(2310000、2310170)
- (4) 給水用ポートを使用して給水する。(2340170)
- (5) コネクタを本品と接続する他の呼吸回路に接続する。

* <使用方法等に関連する使用上の注意>

1. チャンバーを設置する際は、チャンバーチューブを外してから、コネクタ保護キャップを取り外すこと。[キャップを先に外すとチャンバーチューブに過剰な負荷がかかり、チャンバーチューブの付け根が破損するおそれがある。]
(2310000、2310170)
2. チャンバーチューブの先端にはキャップがついているため、補充用水バッグに刺す直前までキャップを外さないこと。バッグへの抜き差しの際は充分注意して取扱い、使用後は再びキャップをしてから廃棄すること。
3. 最高気道内圧以上の圧を保って給水できるように、補充用水バッグとチャンバーの間に高低差を設けること。[静水圧差を利用するため、PEEP や気道内圧が高い場合は水が落下しにくくなることもある。] (2310000、2310170)
4. チャンバーの水位が maximum water level(最大水位)より少し下の適正水位であることを確認する。この最大水位を超えた場合、チャンバーを交換すること。(2310000、2310170)
5. チャンバーに給水する際は、MAX ラインを越さないよう注意すること。(2340170)
6. 37℃以上の温水を追加しないこと。
7. 装着した加湿器から取り外すときには、充分冷めてから行うこと。[火傷をするおそれがある]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- * (1) 消毒・滅菌処理しないこと。[本品に収縮・破損など品質上の不具合が生じる可能性があるため]
- (2) 使用前に水や薬液で濡らさないこと。
- * (3) 本品に過度な負荷をかけないこと。[本品の破損等により品質上の不具合が生じる可能性があるため]

- (4) コネクタの接続は、形状が適合する相手方に対して行い、適度な力で接続すること。
- (5) 使用中、呼吸回路内に溜まった水分が逆流しないように、呼吸回路構成部品全体の配置に気をつけること。

* 2. 相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)

(1) 併用禁忌(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
・人工鼻 ・単回使用人工鼻用フィルタ ・人工呼吸器フィルタ(人工鼻として使用される場合)	換気が困難となるおそれがある。	人工鼻のフィルタの閉塞、流量抵抗の上昇

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管上の注意

- (1) 室温下で保管すること。
- (2) 水に濡れないように保管すること。
- (3) 直射日光の当たる場所、高温・多湿な場所、過度なほこりが発生する場所、空气中に塩分やイオウ分を含む場所での保管は避けること。
- (4) 重ねて保管する場合には重みで本品が破損しないように配慮すること。

* <有効期間>

本品のラベルの使用期限を参照すること。

<使用期間>

7日間 [自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

日本メディカルネクスト株式会社

電話番号：06-6222-6606

製造元

インターサージカル社(英国)

Intersurgical Limited