



【IS-50】

* 2017年8月(第2版)(新記載要領に基づく改訂)
2016年4月(第1版)

医療機器認証番号: 223AFBZX00106000

機械器具 6 呼吸補助器
管理医療機器 呼吸回路セット (JMDN コード 70566000)

インターサージカル呼吸回路シリーズ (2025170/2026170)

再使用禁止

*【警告】

＜使用方法＞

1. 使用前に接続に誤りがないか、使用前および使用中に各接続部が気密かつ確実に漏れや閉塞がないか、また、酸素の吹き出しを確認すること。[適切な呼吸管理が行えないおそれがある。]
2. 使用中は患者の状態を定期的に観察すること。[患者の異常を発見できないおそれがある。]

*【禁忌・禁止】


＜使用方法＞

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


＜形状＞

1. 2025170 : 吸気側熱線入り、スリーブ付き

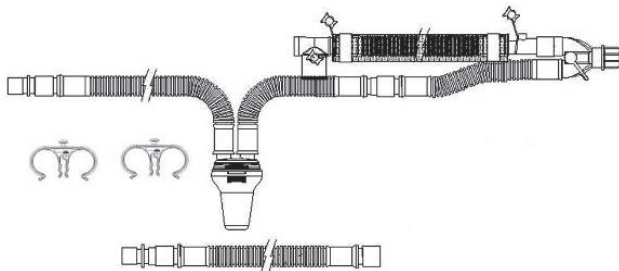

回路長	1.6m+0.4m
患者側コネクタ	22M/15F
機械側コネクタ	22F
付属品	呼吸管クリップ×2

2. 2026170 : 吸気側呼気側熱線入り、スリーブ付き

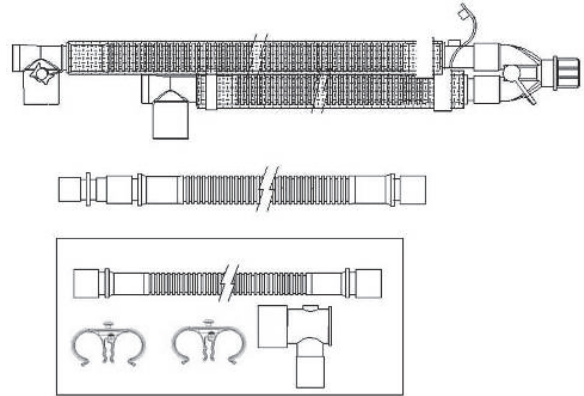

回路長	1.6m+0.4m
患者側コネクタ	22M/15F MDIポート付き
機械側コネクタ	22F
付属品	0.4mフレックスチューブ、両端22F 22F-22Mエルボーコネクタ 呼吸管クリップ×2

＜作動・動作原理＞

中空(中が空洞)である呼吸管内にガスを通過させることによって目的の場所へ送気するものである。
ウォータートラップは、呼吸管と呼吸管の間に配置し、重力による自然落下を利用して呼吸管内に付着した水分を貯留させる。呼吸管内のヒーター線は、三つ葉型コネクタから電源供給を受け、ヒーター線が発熱することにより呼吸管内のガス温度を上げる。チャンバーは、装着した加温加湿器により加温されたチャンバー内の水が気化することにより、チャンバー内を通過するガスの湿度を上げる。精製水が減少することでフロートが下がり、一方向弁が開放されることで給水が行われる。精製水が水位レベル上限に達するとフロートが押しあがり、一方向弁が閉じることで給水が停止する。

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

人工呼吸器等に接続し、呼吸管理に用いること。

【使用方法等】

＜使用方法＞

* 1. 使用

- (1) チャンバーのコネクタについているセーフティキャップを外す。
- (2) チャンバーに給水する。
- (3) チャンバーコネクタをチャンバーに接続する。
- (4) Yピースについているセーフティキャップを外す。
- (5) Yピースを本品と接続する人工呼吸器用マスクや呼吸回路用コネクタなどに接続する。
- (6) 機械側コネクタを本品と接続する人工呼吸器に接続する。

- (7) 別途用意された電気的アダプタを加湿器、チャンパーコネクタ（三つ葉型）、（三つ葉型、楕円型：2026170）に接続する。
- (8) 別途用意された温度プローブを緑色の長い吸気側チューブに2箇所（患者側ポートとチャンパー側）接続する。チャンパー側コネクタの接続は、チューブ側コネクタのVマークと温度プローブ側のVマークがぴたりと重なるように接続すること。



* <使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 最高気道内圧以上の圧を保って給水できるように、補充水バッグとチャンパーの間に高低差を設けること。[静水圧差を利用するため、PEEP や気道内圧が高い場合は水が落下しにくくなることもある。]
2. 37℃以上の温水を追加しないこと。
3. 装着した加湿器から取り外すときには、充分冷めてから行うこと。[火傷をするおそれがある]
4. ウォータートラップのカップ部分の接続を確実にするための注意喚起として、同封の下記シールをウォータートラップのカップ部分に貼付する。その際、ウォータートラップ内の水量の目視確認の妨げにならないようカップの上部に貼ること。

⚠ ガスリーク注意

5. ウォータートラップに溜まった水は適宜排水すること。[水が回路内を閉塞させるおそれがある]
6. ウォータートラップに半分以上水を溜めた状態で使用しないこと。[水が回路内を閉塞させるおそれがある]
7. ウォータートラップの蓋の内側にある青い開閉蓋は、カップの取付け・取外し毎に自動開閉する構造になっている。ウォータートラップのカップが再接続できない場合は、青い開閉蓋が適正位置からずれたことが考えられるため、図の矢印方向へ止まるまで回して再接続すること。



8. 排水後カップを接続する際には、ウォータートラップと平行な状態を保って回し入れること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
- * (1) 消毒・滅菌処理しないこと。[本品に収縮・破損など品質上の不具合が生じる可能性があるため]
 - (2) 使用前に水や薬液で濡らさないこと。
 - * (3) 本品に過度な負荷をかけないこと。[本品の破損等により品質上の不具合が生じる可能性があるため]
 - (4) コネクタ/Y ピースの接続は、形状が適合する相手方に対して行い、適度な力で接続すること。
 - (5) 使用中、呼吸回路内に溜まった水分が逆流しないように、呼吸回路構成全体全体の配置に気をつけること。

- * (6) 三つ葉型コネクタ及びチャンパーは、適合する加湿器のみに接続すること。[過度の温度上昇等の思わぬ事故が起きるおそれがある]
- * (7) 適正な加温・加湿を保つため、チャンパーを通過するガスの最大吸気流量は、180L/分を超えないようにすること。
- * (8) 人工鼻のフィルタは、加温加湿器と併用した場合、過度の吸湿により閉塞し、換気が困難となるおそれがあるため、併用しないこと。
なお、対象となる人工鼻の「一般的名称」は次のとおり。
・人工鼻
・単回使用人工鼻用フィルタ
・人工呼吸器フィルタ(人工鼻として使用される場合)
- (9) 2026170 の呼気側、機械側にフィルタを使用する場合は、クリアガード・ミディ 1644000 等の使用を推奨する。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管上の注意

- (1) 室温下で保管すること。
- (2) 水に濡れないように保管すること。
- (3) 直射日光の当たる場所、高温・多湿な場所、過度なほこりが発生する場所、空气中に塩分やイオウ分を含む場所での保管は避けること。
- (4) 重ねて保管する場合には重みで本品が破損しないように配慮すること。

* <有効期間>

本品のラベルの使用期限を参照すること。

<使用期間>

7日間 [自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

日本メディカルネクスト株式会社

電話番号：06-6222-6606

製造元

インターサージカル社(英国)

Intersurgical Limited