



【IY-03】

** 2016年 3月 (第3版) (新記載要領に基づく改訂)

* 2012年 11月 (第2版)

医療機器届出番号: 27B1X00116000173

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 切除臓器摘出器具 (JMDNコード: 70171000)

コバメッド フレキシブルキャッチャー

再使用禁止


【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

1. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

〈形状〉

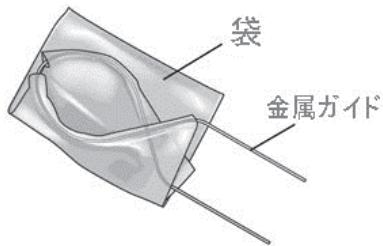

〈組成〉

名称	材質
袋	ポリウレタン
金属ガイド	**ステンレス鋼 (ニッケル・クロムを含む)

〈作動・動作原理〉

袋に組織等を入れた後、金属製のガイドに沿って袋の上部を絞り閉鎖を行う。

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

本品は、臓器を原位置に保持又は固定すること及び、体外に摘出したりすることに用いる。

【使用方法等】

〈使用方法〉

- ** 1. 本品は滅菌済みの製品である。開封し、無菌的に取り出すこと。
2. 開創部位より挿入可能となるように、本品の金属ガイドを变形させる。
 3. 体腔内にて袋を広げ結紮糸・対象組織等を袋内部に入れる。
 4. 体腔内より金属ガイドをゆっくりと引き、袋の上方を体外に出す。
 5. 袋の上方を絞り、止血鉗子等にて把持した後、金属ガイド部分を切り離す。
 6. 袋の破損に注意を払い、内容物とともに袋を体外へ導出する。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- ** 1. 本品の袋部分が密着している場合は、丁寧に剥離して使用すること。剥がれにくい場合は、生理食塩水等で濡らすと剥がれやすくなる。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ** (1) 開封後に使用しなかった場合、再滅菌せずに廃棄すること。
- (2) 鋭利な手術器具、切断器具、電気メス、あるいはその他の器具と接触しないように注意すること。
- (3) 体腔内より取り出す際に、過度な力をかけないこと。

【保管方法及び有効期間等】

** 1. 保管上の注意

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避けて常温で保管すること。

〈有効期間〉

** 3年間[自己認証(当社データ)による]

使用期限は直接の包装および外箱に表示している。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

日本メディカルネクスト株式会社

** 電話番号: 06-6222-6606