



* VP030102 *

【VP-03】

* 2017年6月(第2版)
2017年2月(第1版)

医療機器届出番号: 27B1X00116000257

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 調整用薬液注入コネクタ (JMDNコード: 70396000)

PFウォーターボトルアダプター

再使用禁止

【禁忌・禁止】


＜使用方法＞

1. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

＜形状＞

本品は未滅菌品である。

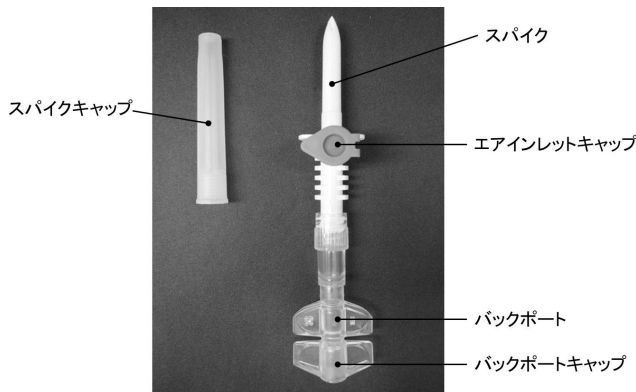

* ＜組成＞

バックポート、バックポートキャップ: ポリ塩化ビニル (可塑剤: トリメリット酸トリス (2-エチルヘキシル) を含む)

＜作動・動作原理＞

本品を滅菌水ボトル等と加温加湿器の患者回路のスパイクの間に装着し、滅菌水を加温加湿器に注入・排出する。インレットフィルタから空気を取り込むことで、注入・排出中に硬質の滅菌水ボトル等が陰圧状態になることを防ぎ、滅菌水の注入・排出を容易にする。

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

本品は、滅菌水ボトル等と加温加湿器の患者回路のスパイクの間に装着し、滅菌水を加温加湿器に注入・排出するために用いる。

【使用方法等】

＜使用方法＞

1. バックポートキャップを捻って切り離す。
2. 加温加湿器の患者回路のスパイクをバックポートに挿入する。
3. スパイクキャップを外す。
4. スパイクを滅菌水ボトル等の採液口に穿刺する。
5. エアインレットキャップを開ける。
6. 滅菌水ボトル等を IV ポールに吊り下げる。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. スパイクを滅菌水ボトル等の採液口に穿刺する際は、手元に注意すること。

＜組み合わせて使用する医療機器＞

販売名	医療機器認証番号
プレジジョンフロー	226ADBZX00199000

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 界面活性剤またはアルコール等を含む消毒剤を使用する場合は、本体のひび割れについて注意すること。
- (2) 使用中は本品の破損、接合部の緩み及び滅菌水漏れ等について、定期的に確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管上の注意

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避けて常温で保管すること。

＜有効期間＞

本品のラベルの使用期限を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

日本メディカルネクスト株式会社

電話番号: 06-6222-6606

製造元

バイタルメッド社(アメリカ合衆国)

VitalMed Inc